

業務用EMS美容器

# BODY THERA PRO II

ボディセラプロ II

## 取扱説明書

保証書付



## 目次

安全上のご注意 正しく安全にお使いいただくために	P2~7	BODY-2モード	P15~16
構成品/仕様	P8	BODY-3モード	P17~18
各部の名称とはたらき	P9	BODY-4モード	P19~20
本器の特長	P10	BODY-5モード	P21~23
使用前の準備	P11~12	故障かな?と思ったら	P24
使用方法 BODY-1モード	P13~14	保証書	裏表紙

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
この取扱説明書は、いつでもすぐにお読みいただけるよう、大切に保管してください。



## 安全上のご注意 正しく安全にお使いいただくために

- 取扱説明書は、本器を安全にお使いいただくために必要です。本器を人に貸したり、譲渡するときは、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡してください。
- ご使用前に、この取扱説明書をよく読み、注意事項を守り正しくお使いください。
- あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記のような絵表示をしています。危害や損害の程度を表していますので、内容を理解してから本文をお読みください。

 <b>危険</b>	取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。
 <b>警告</b>	取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	取扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性、または物的損害が想定される内容を示します。

表示例	表示内容
	 は、「危険・警告・注意」を促す内容です。 ※表示例は「感電注意」です。
	 は、してはいけない「禁止」の内容です。 ※表示例は「分解禁止」です。
	 は、行為を指示する「強制」の内容です。 ※表示例は「プラグをコンセントから抜く」です。

### 危険

-  次のような人には使用しない。また、自覚症状のある人に対しては、必ず医師と相談した上で使用する。
  - 心臓疾患の人  
身体のトラブルのおそれがあります。
-  オーバートリートメントはしない。  
身体に危害を与えるおそれがあります。  
下記のような医療機器と併用しない。
  - ペースメーカー等の体内植込み型電気機器
  - 人工心肺等の生命維持用電気機器
  - 心電計等の装着型の医用電気機器医療機器の誤作動を招くおそれがあります。



次のような人や部位には使用しない。また、自覚症状のある人に対しては、必ず医師と相談した上で使用する。事故・身体のトラブルのおそれがあります。

- 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人
- 医師が不適当と認めた人
- 医師から運動を禁じられている人、または心臓に注意などの指示を受けている人
- 妊娠中の人
- 心臓に障害のある人
- アレルギー反応の起きやすい人
- 悪性腫瘍のある人
- 38度以上の有熱性疾患の人
- 血圧異常の人(高血圧症の人)
- 貧血症の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 血液循環に問題のある人
- 認知症や意思表示の出来ない人
- 血友病などの出血性素因の高い人
- 伝染性・感染性疾患の人
- 子供・年少者
- 疲労が激しい人・健康(体調)がすぐれない人
- 顔面黒皮病の人や病的なシミのある人
- 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど急性(疼痛性)疾患の人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- アトピー性皮膚炎など皮膚病の人
- マヒのある人
- 心臓疾患の人(心筋梗塞、狭心症及びその危険性がある人)
- 骨粗鬆症の人
- アレルギー体質で特に肌が敏感な人
- 病名などがはっきりしない人
- 薬を服用している人
- 化膿性疾患のある人
- 機器の使用で疼痛が激しくなる人
- 多発性硬化症の人
- 寝たきりの人
- 安静を必要としている人
- 過度の日焼けで炎症を起こしている人
- 過度に毛細血管がもろい人
- 正常な判断ができない人(お酒を飲んだ人、睡眠薬を飲んだ人)
- てんかんなど、引きつけで意識を失う発作性の人
- 背骨に異常のある人
- 美容整形手術後3ヶ月以内の人
- 損傷、炎症、その他の異常がある部位
- 心臓
- 月経時の腹部
- 整形手術をした部位
- 目、口(口内を含む)、唇、耳及びその周囲
- 傷口、粘膜、肛門、陰部
- 頭部及び頭髪
- 痛覚、知覚障害を起こしている部位
- 体内に金属、プラスチック、シリコン、合成樹脂、骨セメントなどを埋め込んでいる部位
- かゆみやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 静脈怒張、萎縮性疾患を起こしている皮膚面
- 頸動脈洞上
- 過去に筋腫の手術や治療を受けたことがある部位
- 中程度以上の浮腫のある部位
- 阻血組織がある部位



機器を修理・分解・改造しない。  
火災・やけどのおそれがあります。



機器に異音や異常が発生したら、直ちに使用を中止し、必ず修理を依頼する。  
火災・やけどのおそれがあります。



機器や電源ケーブルに亀裂などの損傷が生じているときは、使用しない。  
火災・感電・事故・怪我のおそれがあります。



本来の目的や用途以外には使用しない。ペットには使用しない。  
事故・故障のおそれがあります。



AC100V以外の電源では使用しない。  
火災・感電・故障のおそれがあります。



電源ケーブルやコードなどの着脱は、プラグ部分を持って確実に行う。  
火災・感電・ショートのおそれがあります。



コード類は容易に離脱しないように、正しく接続する。  
火災のおそれがあります。

-  濡れた手で機器やコードの取扱いをしない。  
感電のおそれがあります。
-  機器の上に水などの入った容器を置かない。  
火災・感電・故障のおそれがあります。
-  機器に水をかけたり、水につけたりしない。  
火災・感電・故障のおそれがあります。
-  地震や雷のときは、直ちに使用を中止する。  
誤作動による火災・怪我・やけどのおそれがあります。
-  機器を寒い場所から暖かい場所に移動した直後に使用しない。  
結露現象が生じ、表示部の誤動作や故障のおそれがあります。
-  他の機器の部品を流用しない。  
やけど・故障のおそれがあります。
-  出力口に触れたり、金属を差し込んだりしない。  
感電・やけどのおそれがあります。
-  使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。  
事故・身体トラブルのおそれがあります。
-  トリートメント中は、お客様から離れない。  
事故のおそれがあります。
-  始業点検を必ず実施し、異常を発見した場合は、直ちに点検・修理を依頼する。  
事故・故障のおそれがあります。
-  使用前にスイッチ等を操作し、本体と付属品が正しく正常かつ安全に作動するか確認する。
-  エステティシャン以外の人は操作しない。  
事故・故障のおそれがあります。
-  年少者に操作させない。  
事故のおそれがあります。
-  ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用する。
-  取扱説明書は、大切に保管する。
-  揮発性の高いもの(ベンジン・シンナー・除光液など)を機器の近くで使用しない。  
爆発・火災のおそれがあります。
-  コード類について、次のような取扱いをしない。  
●傷つけない ●加工しない ●無理に曲げない ●ねじらない ●束ねない  
●引っ張らない ●加熱しない ●重いものを載せない ●破損しない ●挟みこまない  
火災・感電のおそれがあります。
-  機器を落としたり、破損した場合は、直ちに使用を中止し、電源スイッチを切って電源プラグをコンセントから抜き、必ず修理・点検を依頼する。  
火災・感電のおそれがあります。
-  出力中は、6極電極パッドやグレーパッドを交換しない。  
感電・やけどのおそれがあります。
-  6極電極パッド、グレーパッドおよび本体にヒビまたは傷が入っている場合は使用しない。  
肌を傷つけるおそれがあります。

## 警告

-  出力口に金属製の棒やハサミ、ピンなどを差し込まない。  
火災・感電のおそれがあります。
-  コードやパッド類は、強く折りたたんだり、きつく丸めたり、重い物を載せたりしない。
-  機器に水・異物が入った場合は、直ちに使用を中止し、点検を依頼する。  
火災・感電のおそれがあります。
-  電源プラグは、コンセントへ確実に差し込む。  
火災のおそれがあります。
-  電源ケーブルのプラグやコンセントにゴミやほこりなどを付着させたまま使用しない。  
火災のおそれがあります。
-  発汗中や入浴直後の身体が濡れているときは使用しない。  
やけどのおそれがあります。
-  6極電極パッドやグレーパッドを使用する際は、必ずパッドの電極部(黒い部分)全体にイトーボディパルスゲルを塗布する。  
ゲルの量が少なかったり、電極部全体に塗布されていなかったりした場合、やけどなどのおそれがあります。
-  6極電極パッドやグレーパッドを使用する際は、正しく装着する。
-  6極電極パッドとグレーパッドを装着する際は、ホールドベルトとマジックベルトを使用して必ず肌に密着させる。  
装着部分に隙間があると刺激が強く感じたり、やけどなどの原因になります。
-  6極電極パッドやグレーパッド(コード・プラグ含む)にクリーム・オイルなどの化粧品が付着した場合は、水を含ませ固く絞った布などで拭き取る。  
劣化の原因になります。
-  6極電極パッドおよびグレーパッドを肌に当てたり、離したりするときは必ず電源を切る。  
事故・身体トラブルのおそれがあります。

## 注意

-  電源プラグとコンセントを定期点検する。  
火災・感電のおそれがあります。
-  タコ足配線をしない。  
過熱・火災のおそれがあります。
-  専用の電源ケーブル以外は使用しない。  
火災・故障のおそれがあります。
-  長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。  
火災のおそれがあります。
-  次のような場所で機器を使用・保管しない。  
●浴室などの湿気の多い場所 ●ほこりの多い場所 ●直射日光の当たる場所 ●水などのかかる場所 ●傾斜、振動、衝撃のある場所 ●屋外 ●強い電波や磁気の発生する場所 ●年少者の手の届く場所 ●油煙、湯気の当たる場所 ●発熱器具(ストーブなど)の近くなど高温になる場所 ●温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)  
火災・感電・事故・故障・転倒のおそれがあります。
-  痛感や体調不良を訴えられたときは、直ちに使用を中止する。  
事故・身体トラブルのおそれがあります。
-  機器を強く押したり、叩いたり、尖ったもので突いたりしない。  
故障のおそれがあります。

## ⚠ 注意

-  ガス漏れに気づいたときは、直ちに使用を中止し、排気してから電源を切る。  
火災のおそれがあります。
-  他の電気製品(美容機器など)と併用しない。  
誤作動のおそれがあります。
-  コンピューターなどの精密機器や携帯電話・コードレス電話の近くで使用しない。  
誤作動のおそれがあります。
-  電源ケーブルや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。  
火災・感電のおそれがあります。
-  機器を移動するときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
感電、事故のおそれがあります。
-  6極電極パッドやグレーパッドを硬いものにぶついたり、落としたりしない。  
怪我・故障のおそれがあります。
-  停電したときは、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
感電、事故のおそれがあります。
-  日本国外では使用しない。  
事故のおそれがあります。
-   機器を手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
感電・事故のおそれがあります。
-  機器の手入れは、取扱説明書に従う。  
事故・故障のおそれがあります。
-  付属品のコードやパッド、ベルトは1年を目安に点検する。  
3年以上使用した付属品による事故については、当社は責任を負いかねる場合もありますので、あらかじめご理解をお願いいたします。
-  機器を手入れするときは、シンナー・ベンジン・灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉を使用しない。  
事故・故障のおそれがあります。
-  機器を高いところから落とすなどの強い衝撃を加えない。  
事故・故障のおそれがあります。
-  機器の上には付属品以外の物を置かない。  
故障のおそれがあります。
-  使用後は、電源を切って、電源プラグをコンセントから抜く。  
火災・事故のおそれがあります。
-  通電したまま放置しない。  
事故・トラブルのおそれがあります。
-  機器を廃棄するときは、地方自治体の廃棄処理に関する条例または規則に従う。
-  出力したまま放置しない。  
感電・やけどのおそれがあります。
-  機器で遊ばせない。  
事故・怪我のおそれがあります。
-  機器の上に乗らない。  
怪我・故障のおそれがあります。

## 注意

-  機器が汚れた場合は、乾いた布または水かぬるま湯を含ませて固く絞った布で拭く。
-  使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外す。  
やけどのおそれがあります。
-  コード類は、足元の邪魔にならないようにする。  
断線のおそれがあります。
-  機器の周辺には可燃物(雑誌・スプレーなど)を置かない。  
爆発・火災のおそれがあります。
-  電源ケーブルを発熱器具に近づけない。  
火災・感電のおそれがあります。
-  機器の内部へ異物を入れない。  
火災・故障のおそれがあります。
-  電源を切るときは、必ず所定の方法を守り、正しく行う。  
事故・故障のおそれがあります。
-  パッド類の汚れやゲルは、水を含ませ、固く絞った布などで拭き取る。  
水で強いもみ洗いをすると内蔵のコードや電極面が破損するおそれがあります。
-  長期間使用しなかった場合、再使用する前には正常に作動するか点検をする。  
事故・故障のおそれがあります。
-  脱毛・剃毛処理をした当日は、処理をした部位へのトリートメントをしない。  
炎症するおそれがあります。
-  トリートメントは、必ず低いレベルに調節してから始める。  
事故・身体トラブルのおそれがあります。
-  身体の異常や肌に発疹、発赤、かゆみなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止する。  
医師に相談して指示に従ってください。また、しばらく使用を控えてください。
-  刺激が強すぎないか常に確認し、過度な刺激感があるときは出力を下げる。  
肌トラブルのおそれがあります。
-  トリートメント目的にあった時間・出力を超えないように注意する。


# 構成／仕様




本体[1台]




取扱説明書 [1冊]

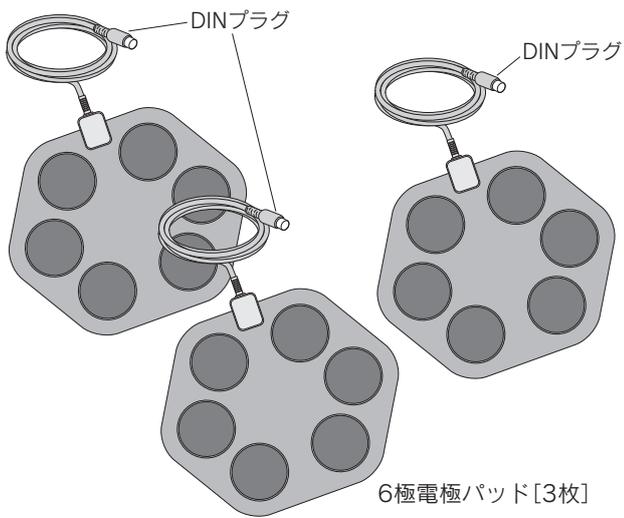

6極電極パッド[3枚]

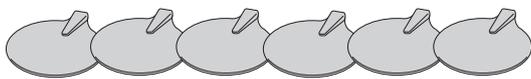

グレーパッド[6枚]

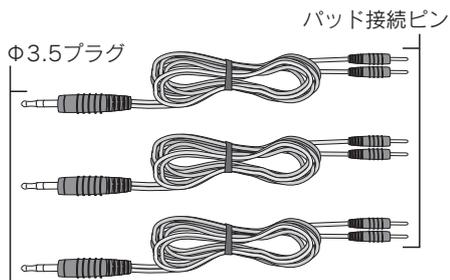

グレーパッド用コード[3本]



電源ケーブル[1本]



イトーボディパルスゲル  
[1本]



ホールドベルト(S) [2枚]



ホールドベルト(L) [2枚]



マジックベルト(L) [2枚]




マジックベルト(S) [6枚]

## 仕様

定格入力電圧	AC100V 50/60Hz	出力	50V(最大)
定格消費電力	26W	タイマー	0~30分
発振周波数	搬送周波数 2500Hz、3000Hz 干渉周波数 3 ~ 400Hz	本体サイズ	(D) 342×(W) 400×(H) 233mm
		本体重量	約6.0kg

# 各部の名称とはたらき

## 正面

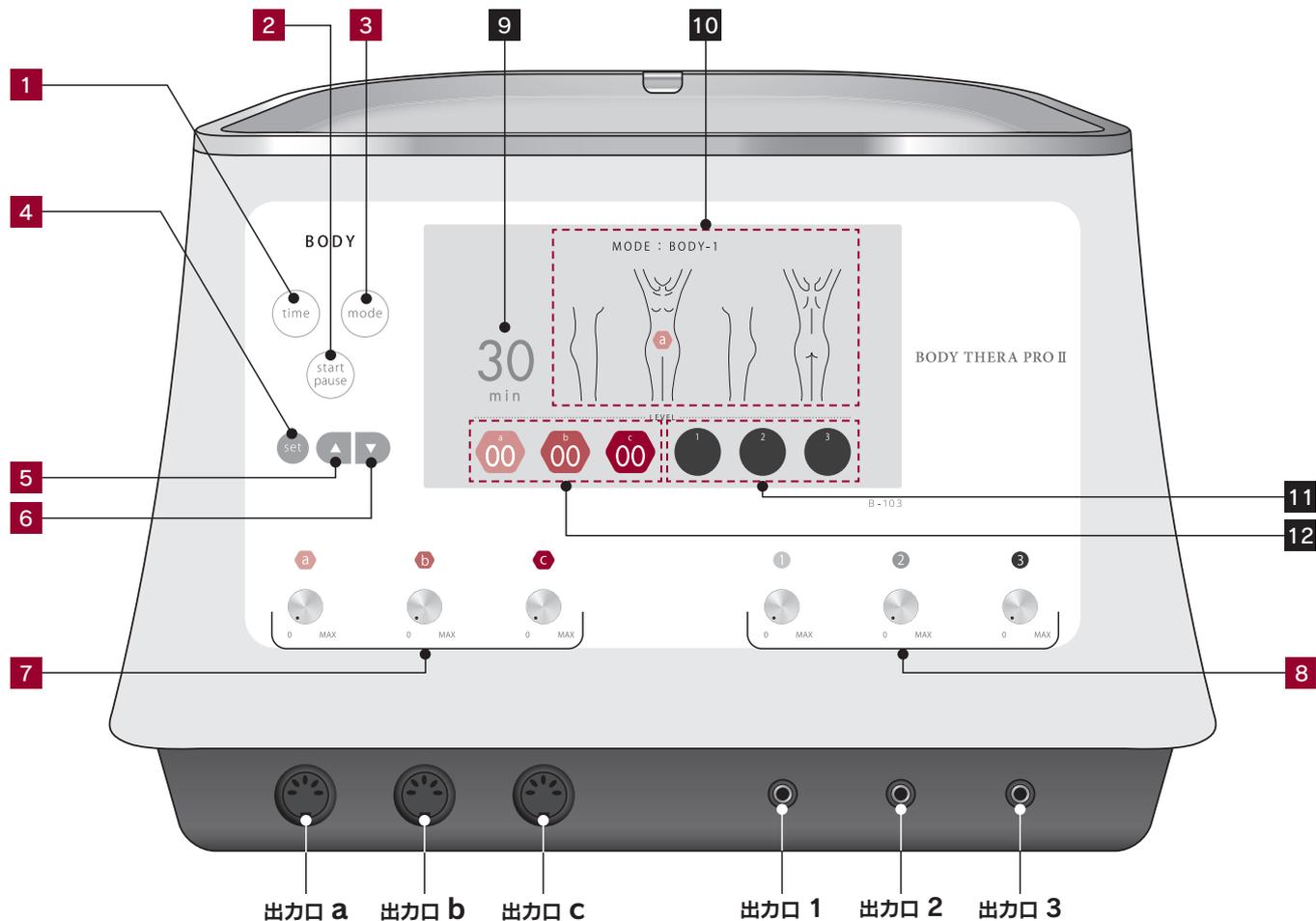

### 1 タイマースイッチ

タイマーを設定します。

### 2 スタート/ポーズスイッチ

出力の開始と一時停止を行います。

### 3 モードスイッチ

モードを選択します。

### 4 セットスイッチ

BODY-5モードでランプアップタイム・ホールドタイム・ランプダウンタイム・レストタイムを選択します。

### 5 アップスイッチ 6 ダウンスイッチ

BODY-5モードでランプアップタイム・ホールドタイム・ランプダウンタイム・レストタイムの時間を設定します。

### 7 出力ボリューム

6極電極パッドの出力レベルを調節します。

### 8 出力ボリューム

グレーパッドの出力レベルを調節します。

### 9 タイマー表示

タイマーを表示します。トリートメント中は残り時間を表示します。

### 10 プログラム表示

現在のプログラムを表示します。


### 11 出力レベル表示

グレーパッドの出力レベルを表示します。

### 12 出力レベル表示

6極電極パッドの出力レベルを表示します。

## 背面

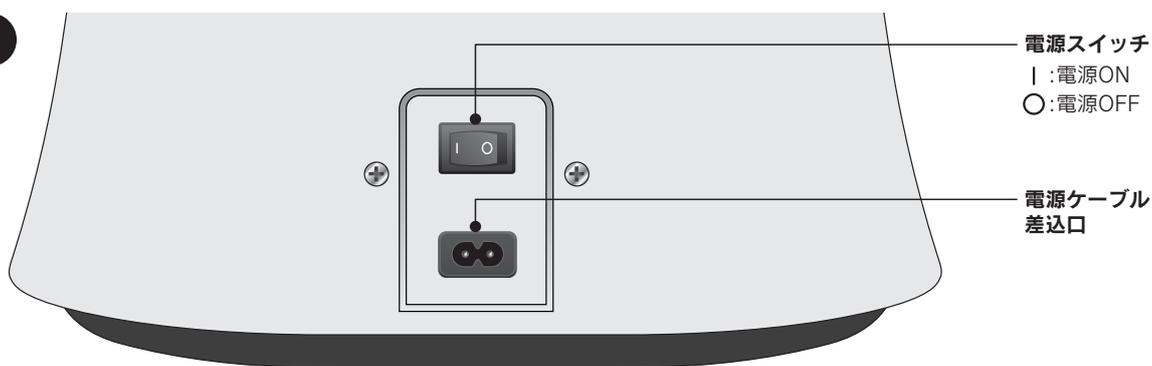

## EMSによるボディリートメント

周波数・波形・出力を独自のプログラミングで制御します。ゆるやかに働きかけ、ゆるやかに解いていくような、繊細で複雑なトリートメントが可能です。


### 搭載モード

#### BODY-1

6極電極パッドによる回転式ポイント通電刺激で、腹部の筋肉を広く・深く捉えて動かします。

※6極電極パッドは最大3枚使用できます。


※グレーパッドは使用できません。

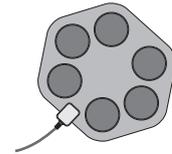

6極電極パッド ×1

#### BODY-2

6極電極パッドによる腹部・背中・ヒップへの回転刺激と筋肉運動、グレーパッドによる脇腹・太もも内側へのマルチカレント(EMS刺激)で、全身のダブルシェイプ効果が期待できます。

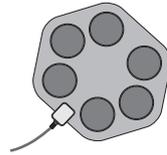

6極電極パッド ×3

+




グレーパッド ×3

#### BODY-3


6極電極パッドによる腹部・背中への回転刺激と筋肉運動、グレーパッドによる脇腹・二の腕へのマルチカレント(EMS刺激)で、上半身のダブルシェイプ効果が期待できます。

※6極電極パッドは最大3枚使用できます。

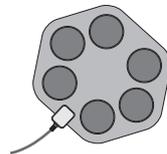

6極電極パッド ×2


+

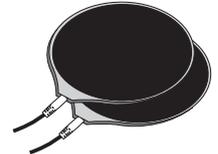

グレーパッド ×3


#### BODY-4

6極電極パッドによる大腿部(前面)・ヒップへの回転刺激と筋肉運動、グレーパッドによる脇腹・太もも(裏側)へのマルチカレント(EMS刺激)で、下半身のダブルシェイプ効果が期待できます。

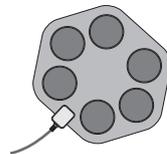

6極電極パッド ×3

+

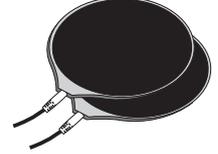


グレーパッド ×3

#### BODY-5

ランプアップタイム、ホールドタイム、ランプダウンタイム、レストタイムを設定できるモードです。お好みの設定でトリートメントが行えます。

※6極電極パッドは使用できません。

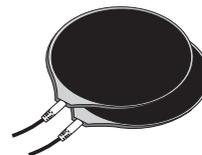


グレーパッド ×3


# 使用前の準備

## 6極電極パッド・グレーパッドの準備


- 1 6極電極パッドのDINプラグを本体の出力口a～cに接続します。

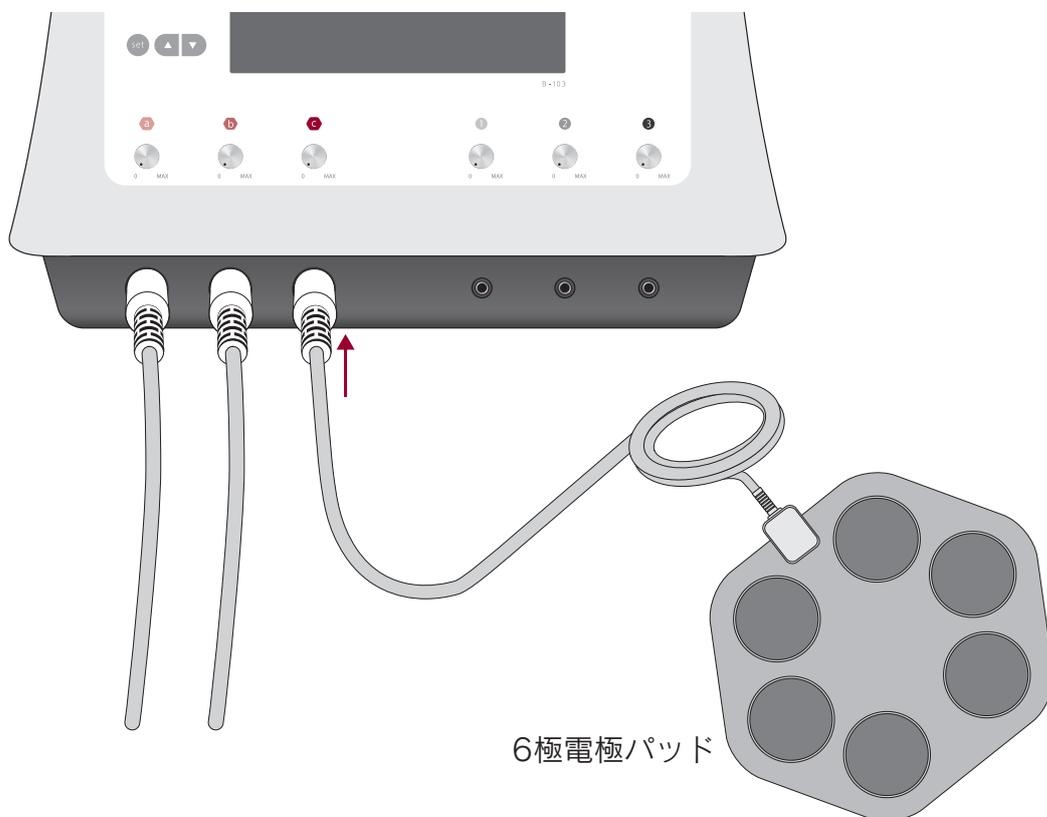


- 2 グレーパッド用コードのパッド接続ピンをグレーパッドに接続します(①)。  
次にグレーパッド用コードのφ3.5プラグを本体の出力口1～3に接続します(②)。

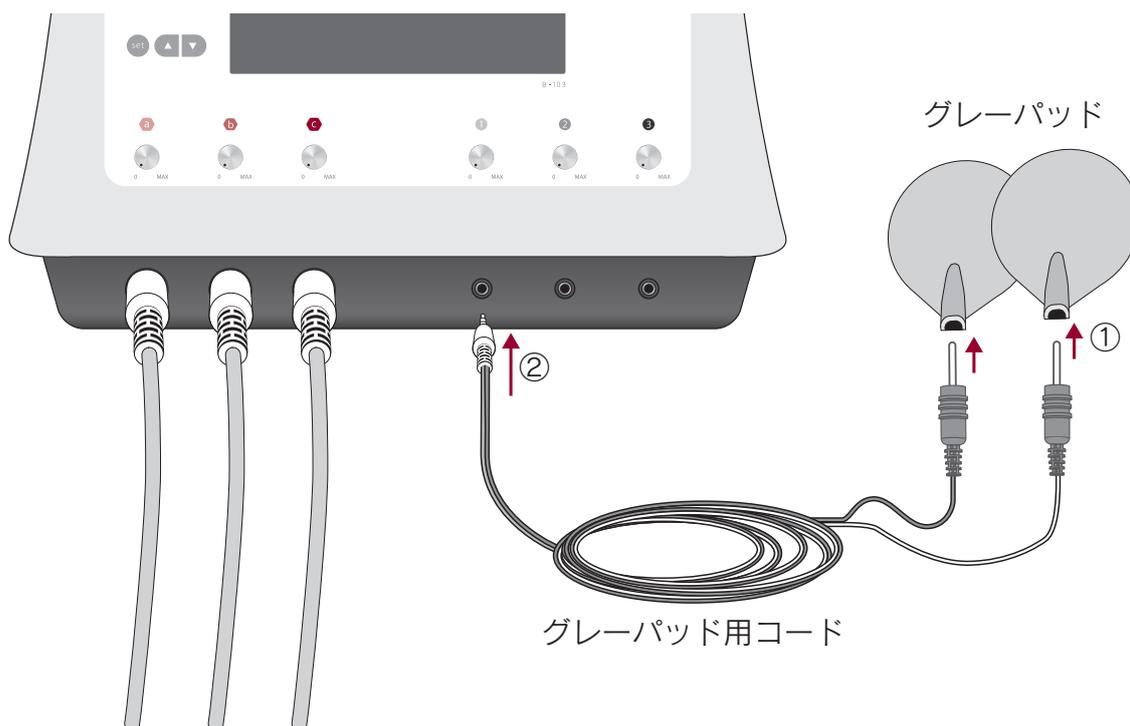

**3** 6極電極パッドとグレーパッドの電極部(黒い部分)全体に、適量のイトーボディパルスゲルを塗布します。

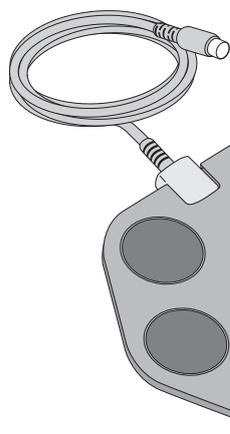

6極電極パッド

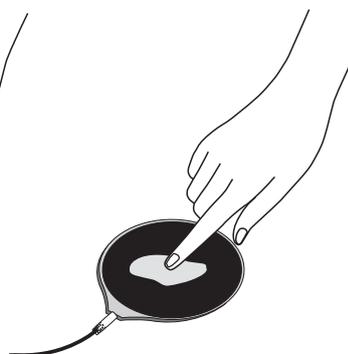


グレーパッド




イトーボディパルスゲル

塗布後イメージ

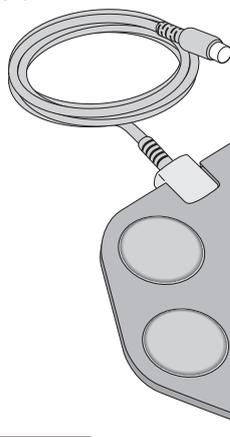

**警告**


- トリートメント部位にクリーム・オイルなどの化粧品が残っていないか確認してください。残っている場合は水を含ませ固く絞った布などで拭き取ってください。パッド（コード・プラグ含む）にクリーム・オイルが付着すると劣化の原因となります。劣化したパッドを使用すると痛みを感じたり、やけどなどの皮膚障害を起こすおそれがあります。
- イトーボディパルスゲルの量が少なかったり、電極部全体に塗布されていなかったりした場合、やけどなどの原因となります。
- 6極電極パッドの黒い部分を折り曲げないでください。パッドの通電が不安定になり、やけどなどの原因となります。

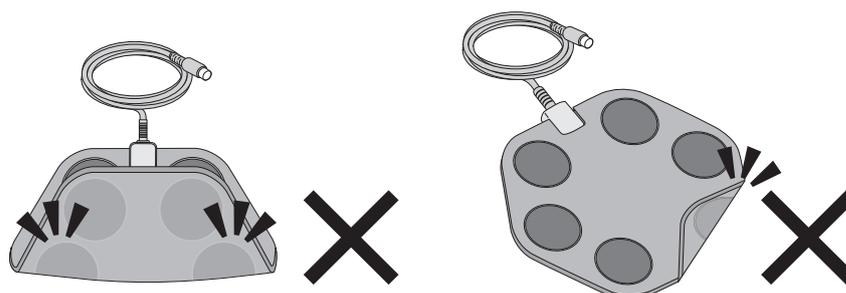


# 使用方法

## BODY-1モード

- 1 電源ケーブルを本体とAC100Vコンセントに接続します。
- 2 全ての出力ボリュームが“0”の位置にあることを確認し、本体背面の電源スイッチをONにします。
- 3 モードスイッチを押して「BODY-1」を選択します。

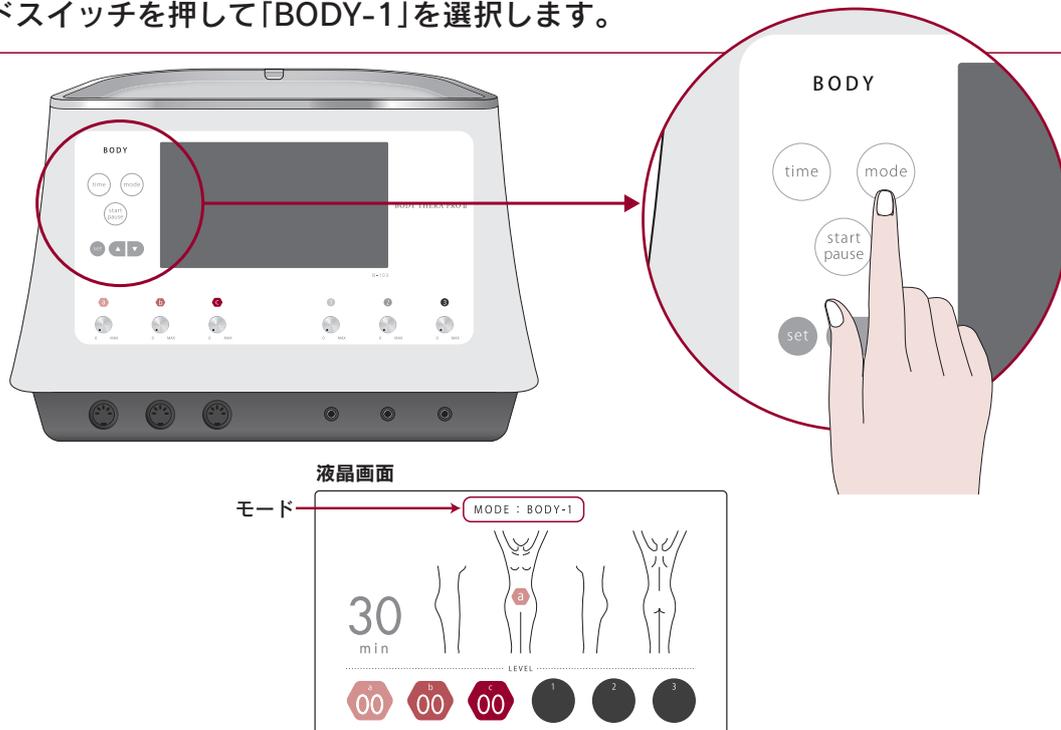

- 4 出力口aに接続した6極電極パッドを腹部に当て、ホールドベルト(L)で固定します。

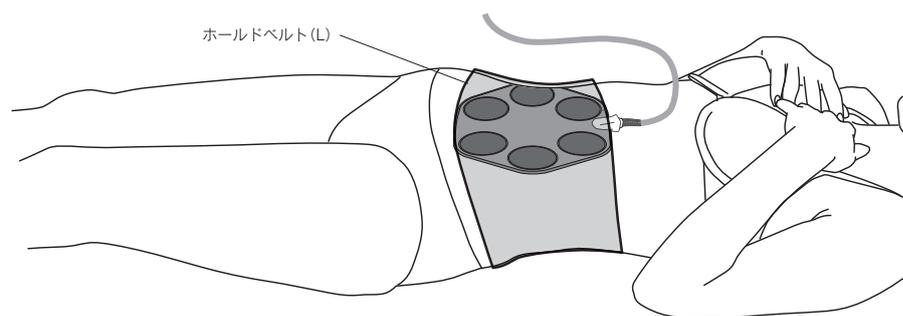



出力口	当てる部位
a	腹部

※出力口b・cも使用  
できます。

### 警告

- トリートメント部位にクリーム・オイルなどの化粧品が残っていないか確認してください。残っている場合は水を含ませ固く絞った布などで拭き取ってください。パッド(コード・プラグ含む)にクリーム・オイルが付着すると劣化の原因となります。劣化したパッドを使用すると痛みを感じたり、やけどなどの皮膚障害を起こすおそれがあります。
- パッドは、ホールドベルトを使用して必ず肌に密着させてください。装着部分に隙間があると刺激が強くなり、やけどなどの原因となります。
- イトーボディパルスゲルの量が少なかったり、電極部全体に塗布されていなかったりした場合、やけどなどの原因となります。

## 5 タイマースイッチを押してタイマーを設定します。

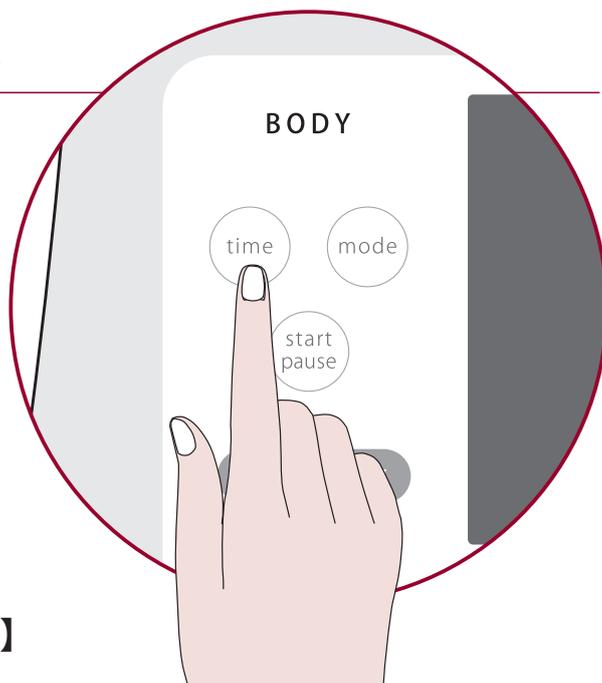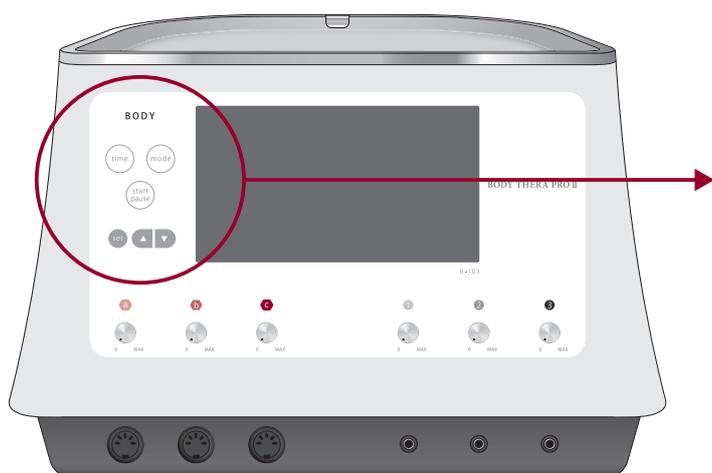


**【30分→25分→20分→15分→10分→5分】**



## 6 スタート/ポーズスイッチを押してから、出力ボリュームを右に回して出力を開始・調節します。【1～99】

- ・スタート/ポーズスイッチを押すとタイマーがスタートします。
- ・出力を一時停止する場合は、スタート/ポーズスイッチを押します。
- ・出力を再開する場合は、出力ボリュームを左に回し、出力レベルを“0”にしてから、スタート/ポーズスイッチを押して、出力ボリュームを右に回します。

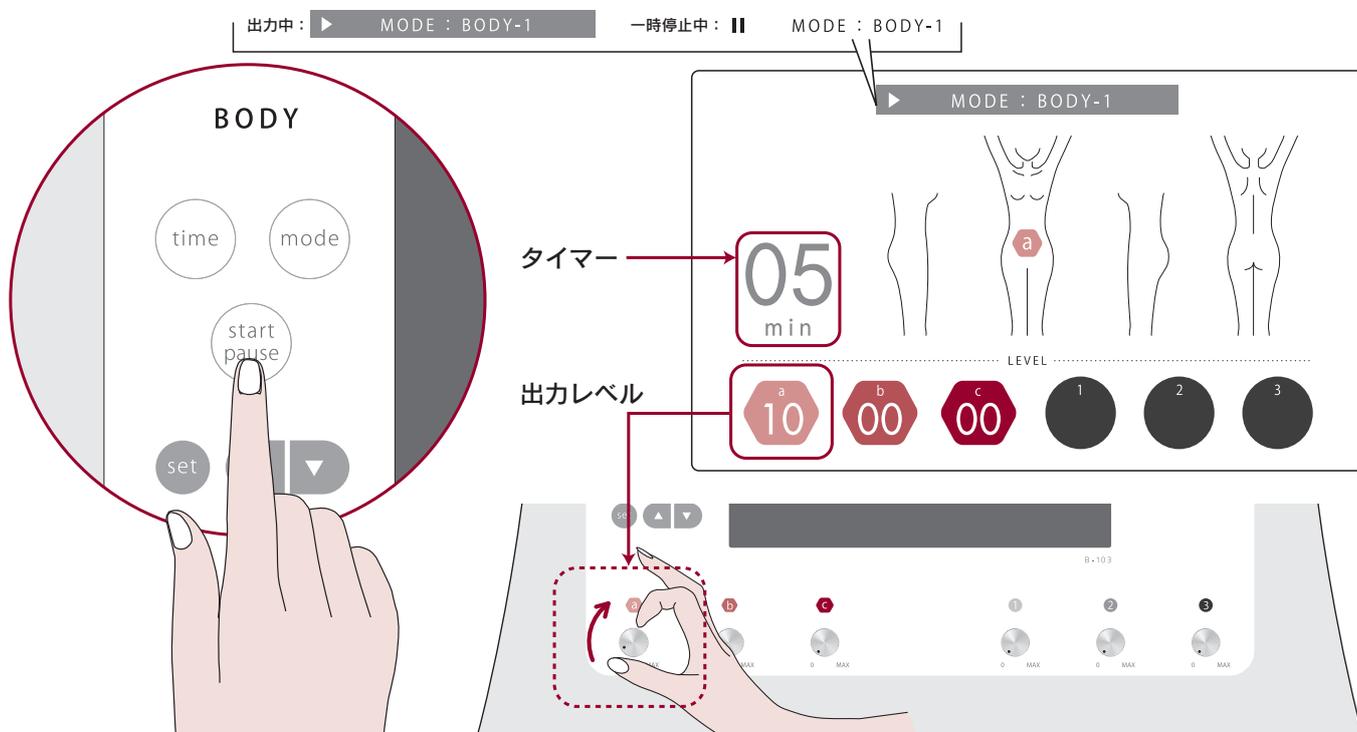

※トリートメント部位に強い刺激(鋭い痛みや熱感など)を感じた場合は、がまんせずに出力を下げてください。やけどなどの原因となります。


## 7 タイマーが終了すると終了音が鳴り、出力が停止します。

出力停止後、全ての出力ボリュームを“0”の位置に戻します。


# 使用方法

## BODY-2モード

- 1 電源ケーブルを本体とAC100Vコンセントに接続します。
- 2 全ての出力ボリュームが“0”の位置にあることを確認し、本体背面の電源スイッチをONにします。
- 3 モードスイッチを押して「BODY-2」を選択します。

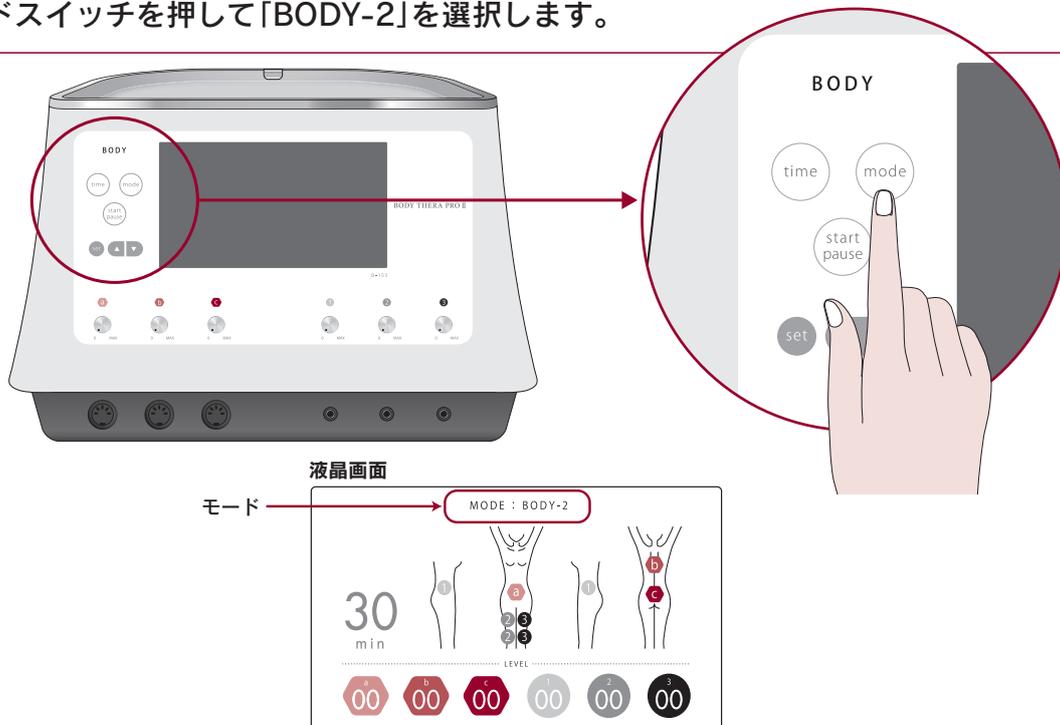

- 4 6極電極パッドとグレーパッドを画面に表示されている各部位に当て、ホールドベルト(L)、マジックベルト(L)、マジックベルト(S)で固定します。


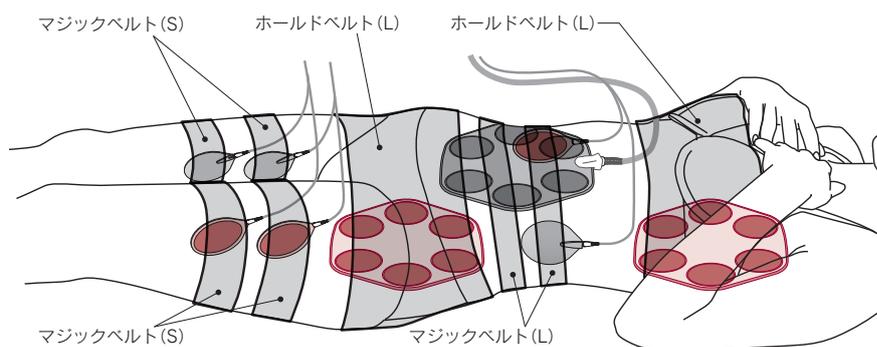


出力口	当てる部位
a	腹部
b	背中
c	ヒップ
1	脇腹(左右)
2	太もも(右・内側)
3	太もも(左・内側)

### 警告

- トリートメント部位にクリーム・オイルなどの化粧品が残っていないか確認してください。残っている場合は水を含ませ固く絞った布などで拭き取ってください。パッド(コード・プラグ含む)にクリーム・オイルが付着すると劣化の原因となります。劣化したパッドを使用すると痛みを感じたり、やけどなどの皮膚障害を起こすおそれがあります。
- パッドは、ホールドベルトとマジックベルトを使用して必ず肌に密着させてください。装着部分に隙間があると刺激が強くなり、やけどなどの原因となります。
- イトーボディパルスゲルの量が少なかったり、電極部全体に塗布されていなかったりした場合、やけどなどの原因となります。


## 5 タイマースイッチを押してタイマーを設定します。

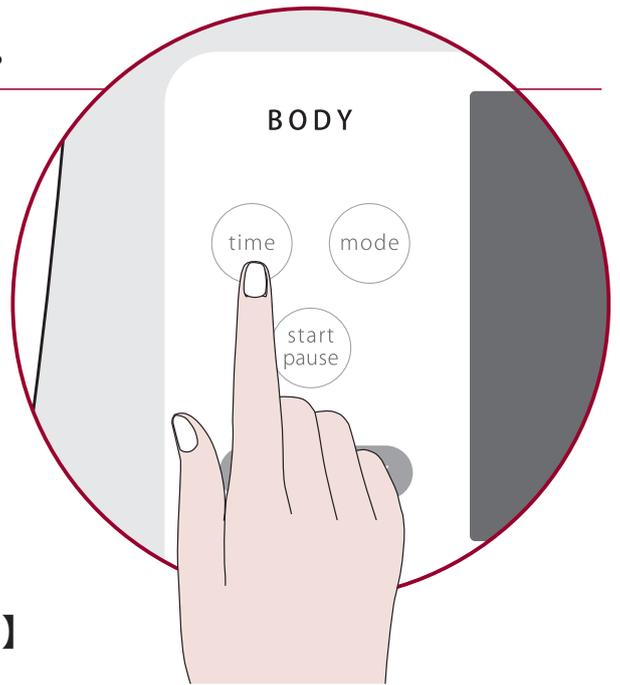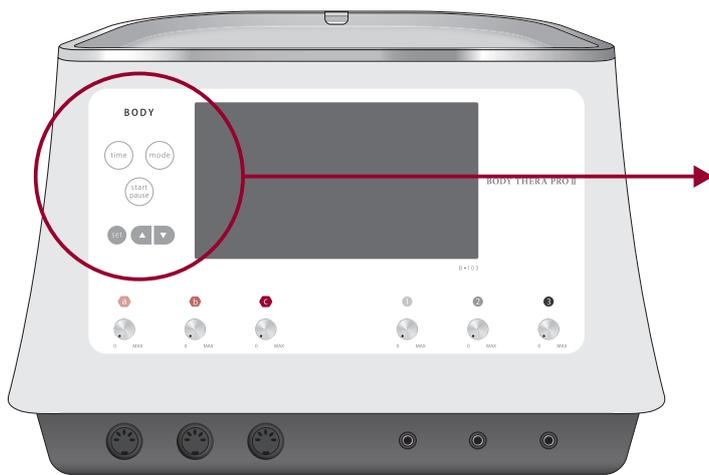

【30分→25分→20分→15分→10分→5分】

## 6 スタート/ポーズスイッチを押してから、出力ボリュームを右に回して出力を開始・調節します。【1～99】

- ・スタート/ポーズスイッチを押すとタイマーがスタートします。
- ・出力を一時停止する場合は、スタート/ポーズスイッチを押します。
- ・出力を再開する場合は、出力ボリュームを左に回し、出力レベルを“0”にしてから、スタート/ポーズスイッチを押して、出力ボリュームを右に回します。

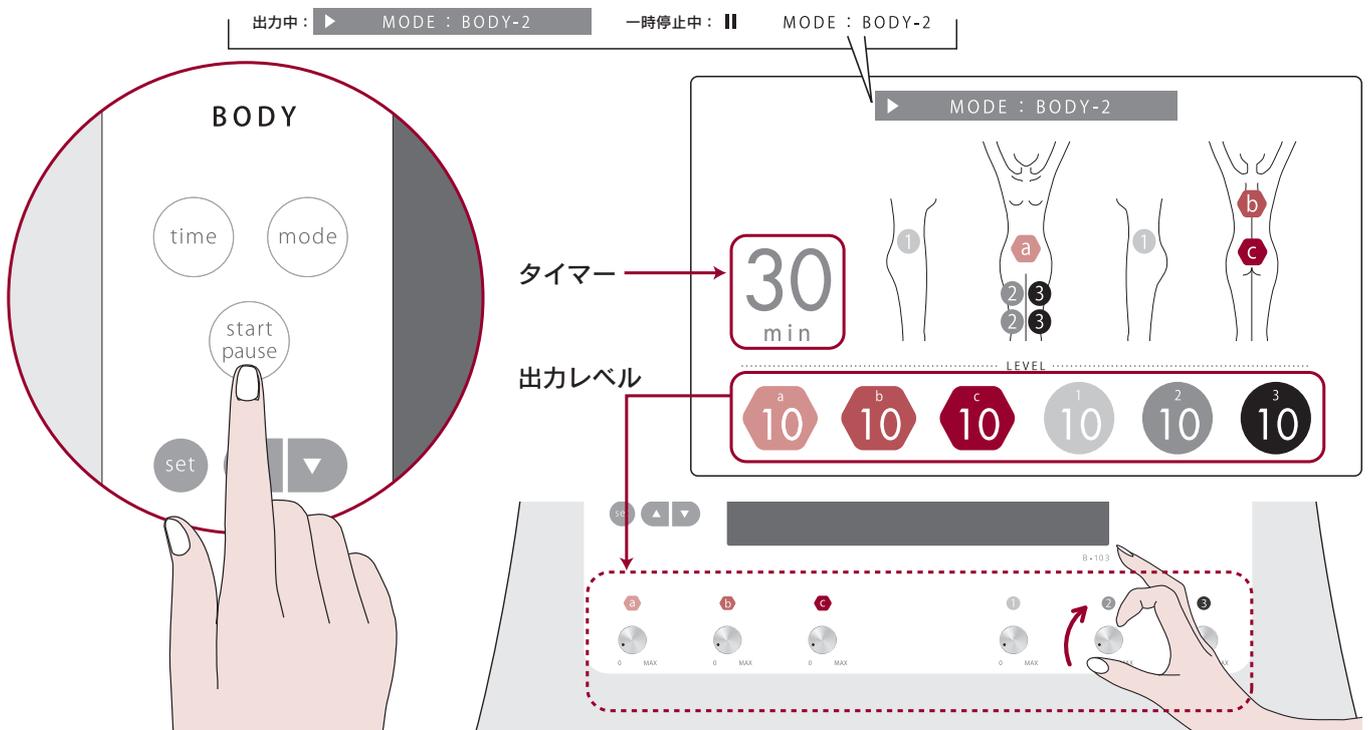

※トリートメント部位に強い刺激(鋭い痛みや熱感など)を感じた場合は、がまんせずに出力を下げてください。やけどなどの原因となります。



## 7 タイマーが終了すると終了音が鳴り、出力が停止します。

出力停止後、全ての出力ボリュームを“0”の位置に戻します。


# 使用方法

## BODY-3モード

- 1 電源ケーブルを本体とAC100Vコンセントに接続します。
- 2 全ての出力ボリュームが“0”の位置にあることを確認し、本体背面の電源スイッチをONにします。
- 3 モードスイッチを押して「BODY-3」を選択します。

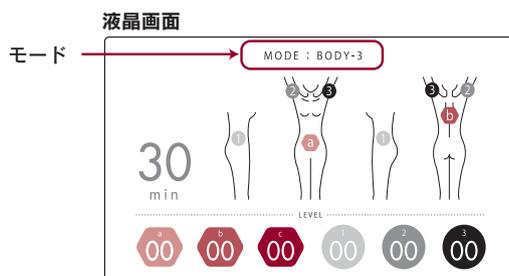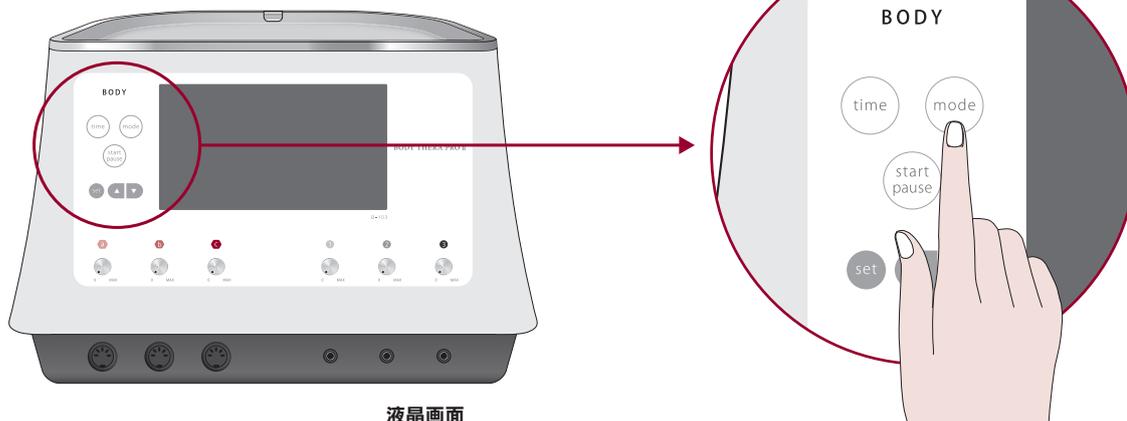

- 4 6極電極パッドとグレーパッドを画面に表示されている各部位に当て、ホールドベルト(L)、マジックベルト(L)、マジックベルト(S)で固定します。

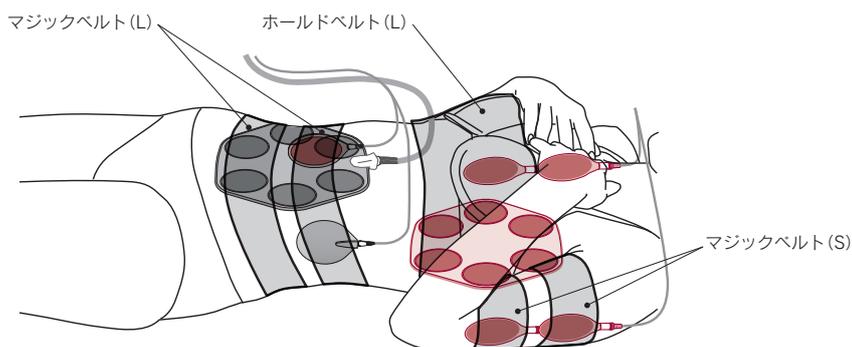


出力口	当てる部位
a	腹部
b	背中
1	脇腹(左右)
2	二の腕(右)
3	二の腕(左)

※出力口cも使用できます。

### ⚠ 警告

- トリートメント部位にクリーム・オイルなどの化粧品が残っていないか確認してください。残っている場合は水を含ませ固く絞った布などで拭き取ってください。パッド(コード・プラグ含む)にクリーム・オイルが付着すると劣化の原因となります。劣化したパッドを使用すると痛みを感じたり、やけどなどの皮膚障害を起こすおそれがあります。
- パッドは、ホールドベルトとマジックベルトを使用して必ず肌に密着させてください。装着部分に隙間があると刺激が強くなり、やけどなどの原因となります。
- イトーボディパルスゲルの量が少なかったり、電極部全体に塗布されていなかったりした場合、やけどなどの原因となります。


## 5 タイマースイッチを押してタイマーを設定します。

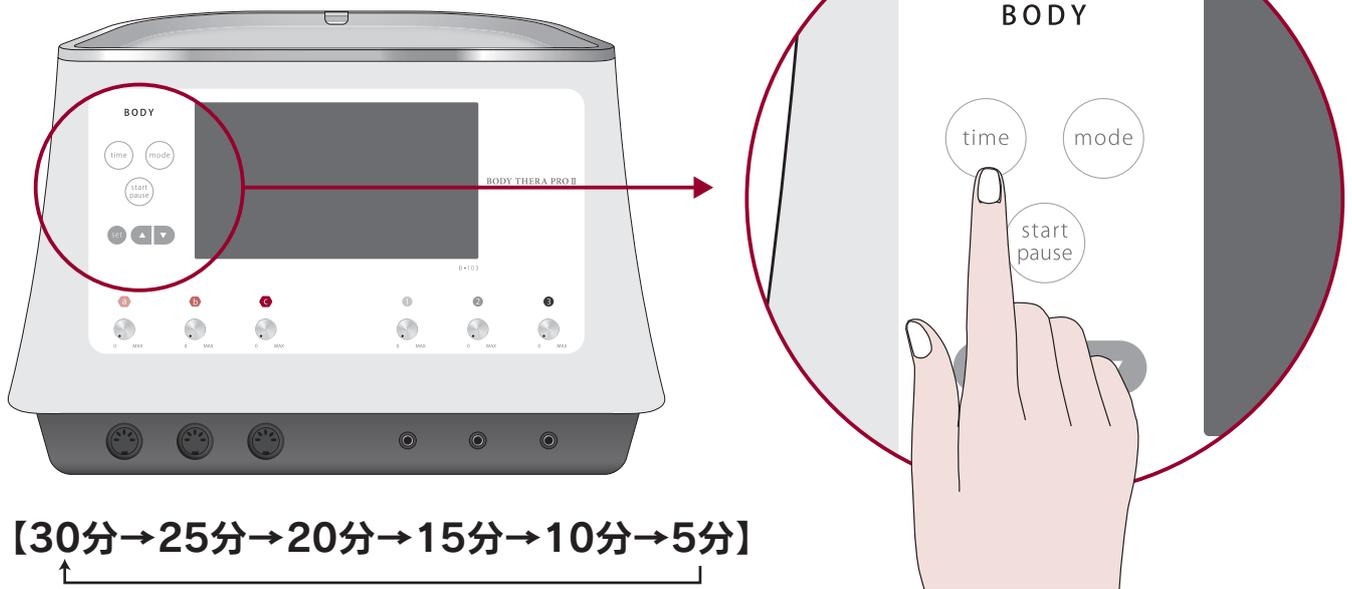

【30分→25分→20分→15分→10分→5分】

## 6 スタート/ポーズスイッチを押してから、出力ボリュームを右に回して出力を開始・調節します。【1～99】

- ・スタート/ポーズスイッチを押すとタイマーがスタートします。
- ・出力を一時停止する場合は、スタート/ポーズスイッチを押します。
- ・出力を再開する場合は、出力ボリュームを左に回し、出力レベルを“0”にしてから、スタート/ポーズスイッチを押して、出力ボリュームを右に回します。

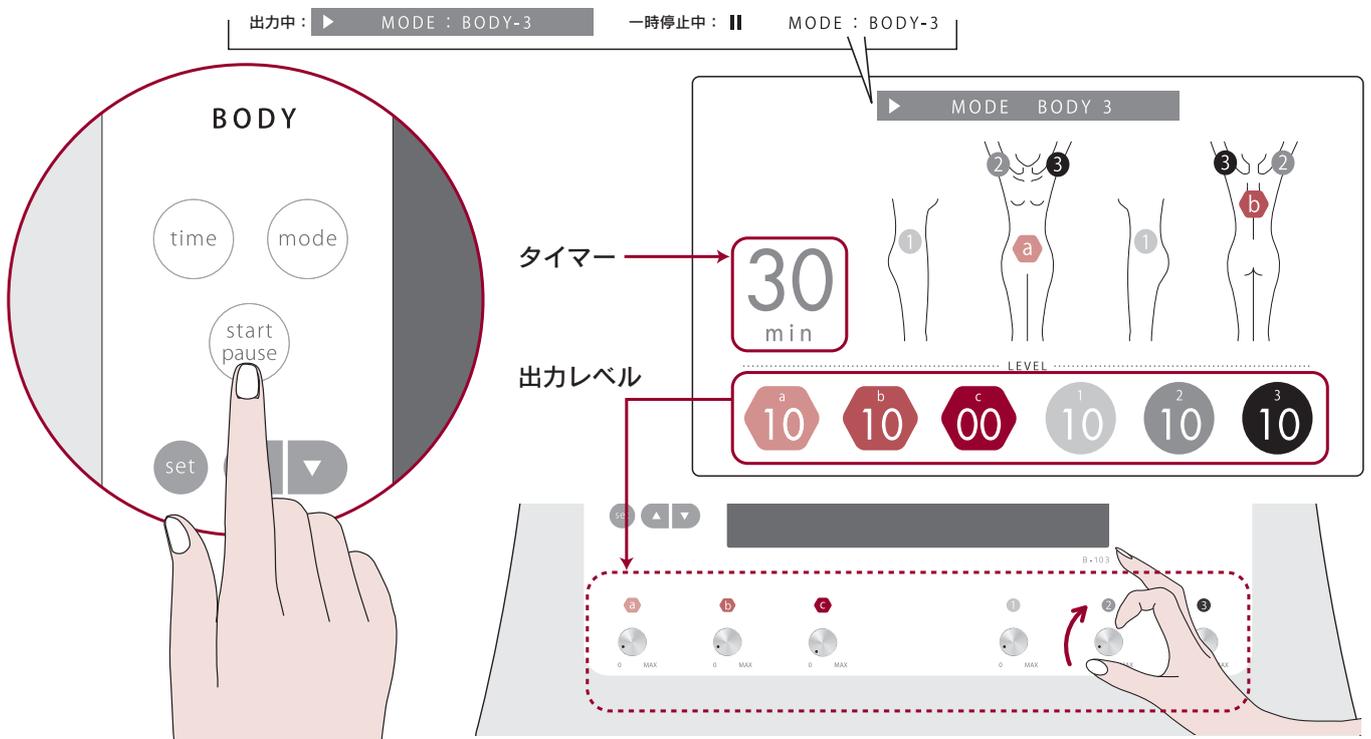

※トリートメント部位に強い刺激(鋭い痛みや熱感など)を感じた場合は、がまんせずに出力を下げてください。やけどなどの原因となります。


## 7 タイマーが終了すると終了音が鳴り、出力が停止します。

出力停止後、全ての出力ボリュームを“0”の位置に戻します。


# 使用方法

## BODY-4モード

- 1 電源ケーブルを本体とAC100Vコンセントに接続します。
- 2 全ての出力ボリュームが“0”の位置にあることを確認し、本体背面の電源スイッチをONにします。
- 3 モードスイッチを押して「BODY-4」を選択します。

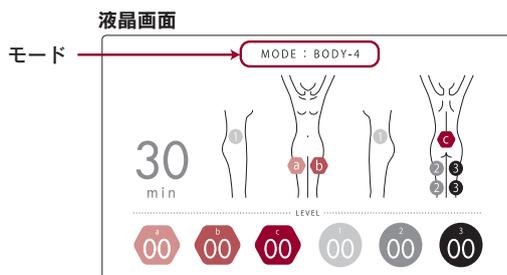

- 4 6極電極パッドとグレーパッドを画面に表示されている各部位に当て、ホールドベルト(L)、ホールドベルト(S)、マジックベルト(L)で固定します。


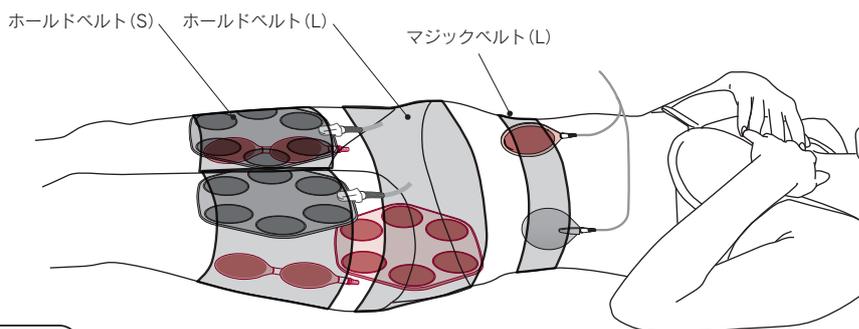


出力口	当てる部位
a	太もも(右・前側)
b	太もも(左・前側)
c	ヒップ
1	脇腹(左右)
2	太もも(左・裏側)
3	太もも(右・裏側)

### ⚠ 警告

- トリートメント部位にクリーム・オイルなどの化粧品が残っていないか確認してください。残っている場合は水を含ませ固く絞った布などで拭き取ってください。パッド(コード・プラグ含む)にクリーム・オイルが付着すると劣化の原因となります。劣化したパッドを使用すると痛みを感じたり、やけどなどの皮膚障害を起こすおそれがあります。
- パッドは、ホールドベルトとマジックベルトを使用して必ず肌に密着させてください。装着部分に隙間があると刺激が強くなり、やけどなどの原因となります。
- イトーボディパルスゲルの量が少なかったり、電極部全体に塗布されていなかったりした場合、やけどなどの原因となります。


## 5 タイマースイッチを押してタイマーを設定します。

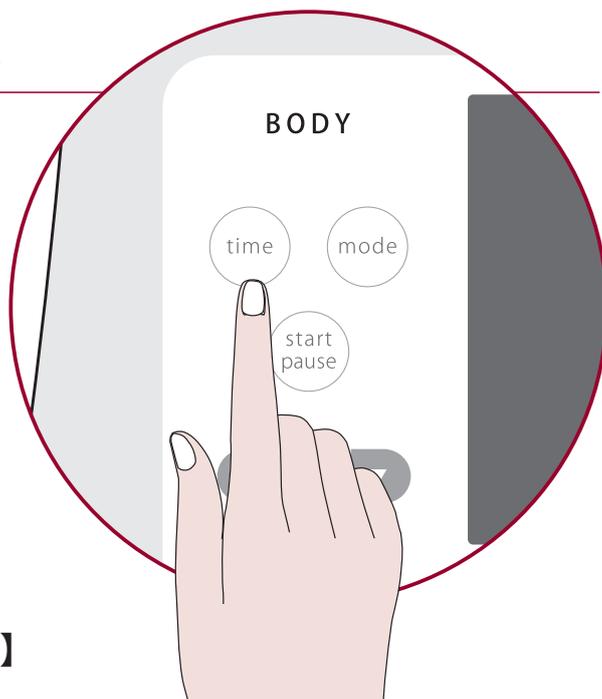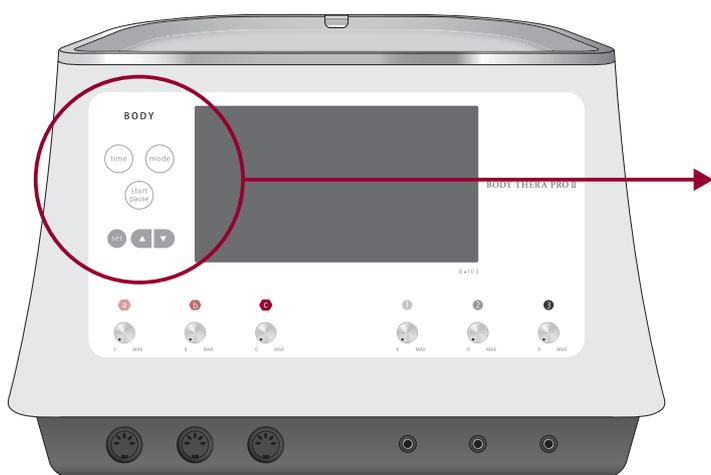

【30分→25分→20分→15分→10分→5分】

## 6 スタート/ポーズスイッチを押してから、出力ボリュームを右に回して出力を開始・調節します。【1～99】

- ・スタート/ポーズスイッチを押すとタイマーがスタートします。
- ・出力を一時停止する場合は、スタート/ポーズスイッチを押します。
- ・出力を再開する場合は、出力ボリュームを左に回し、出力レベルを“0”にしてから、スタート/ポーズスイッチを押して、出力ボリュームを右に回します。

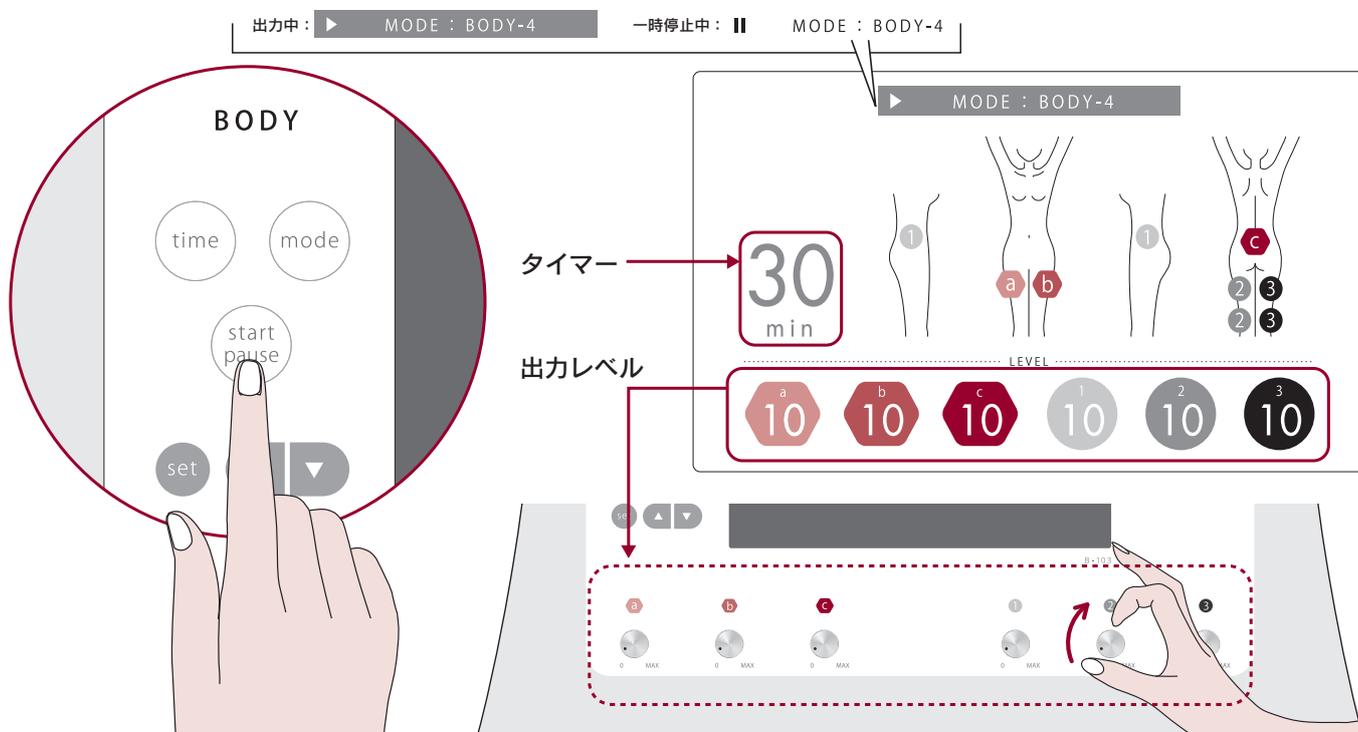

※トリートメント部位に強い刺激(鋭い痛みや熱感など)を感じた場合は、がまんせずに出力を下げてください。やけどなどの原因となります。



## 7 タイマーが終了すると終了音が鳴り、出力が停止します。

出力停止後、全ての出力ボリュームを“0”の位置に戻します。

# 使用方法



## BODY-5モード

- 1 電源ケーブルを本体とAC100Vコンセントに接続します。
- 2 全ての出力ボリュームが“0”の位置にあることを確認し、本体背面の電源スイッチをONにします。
- 3 モードスイッチを押して「BODY-5」を選択します。

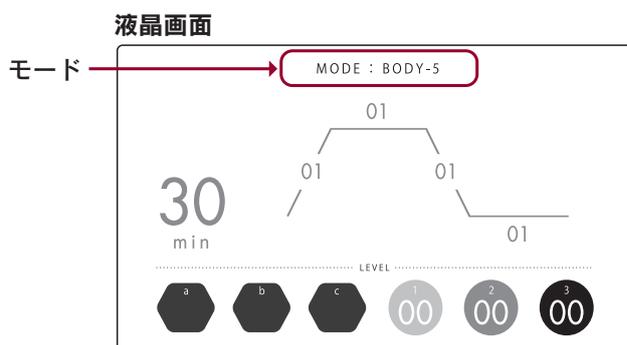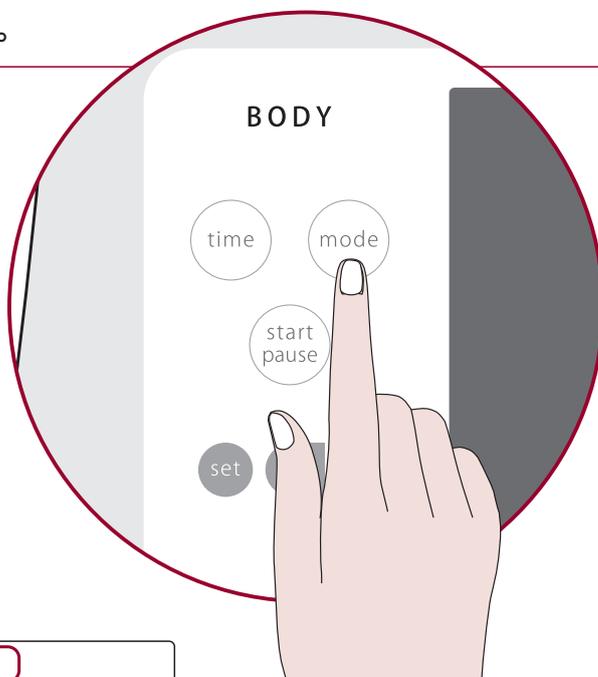

- 4 セットスイッチを押してランプアップタイムを選択し、アップスイッチまたはダウンスイッチでランプアップタイムを設定します。 [1~10秒]


※ホールドタイム、ランプダウンタイム、レストタイムの設定を行う場合も同様です。

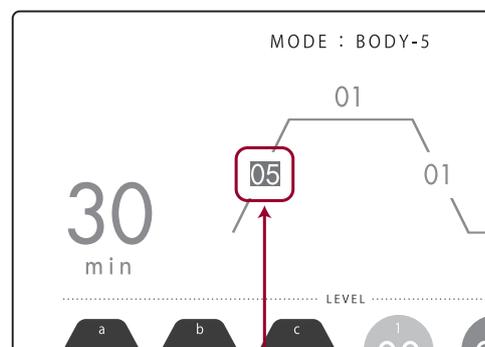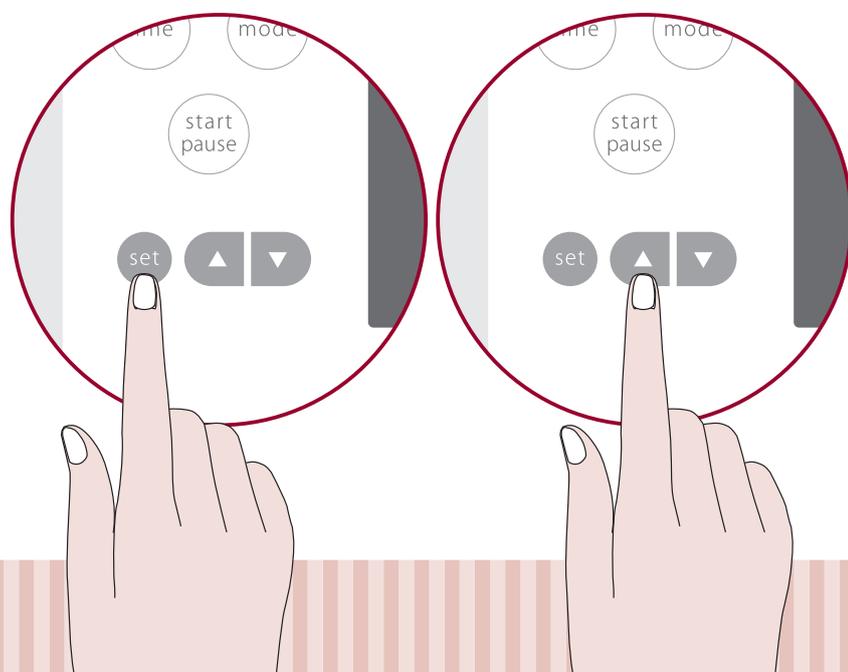

ランプアップタイム

## 5 グレーパッドを目的の部位に当て、ベルトで固定します。


### パッティング例

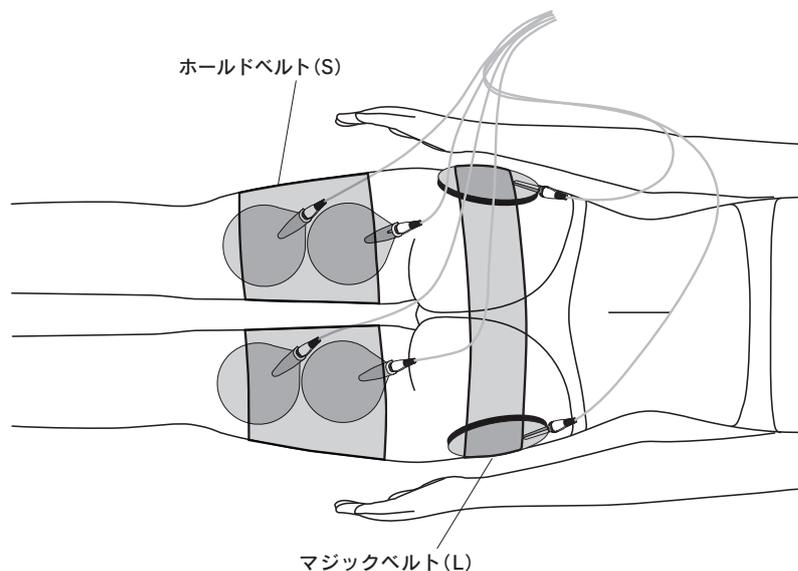

### 警告

- トリートメント部位にクリーム・オイルなどの化粧品が残っていないか確認してください。残っている場合は水を含ませ固く絞った布などで拭き取ってください。パッド(コード・プラグ含む)にクリーム・オイルが付着すると劣化の原因となります。劣化したパッドを使用すると痛みを感じたり、やけどなどの皮膚障害を起こすおそれがあります。
- パッドは、ホールドベルトとマジックベルトを使用して必ず肌に密着させてください。装着部分に隙間があると刺激が強く感じたり、やけどなどの原因となります。
- イトーボディパルスゲルの量が少なかったり、電極部全体に塗布されていなかったりした場合、やけどなどの原因となります。

## 6 タイマースイッチを押してタイマーを設定します。

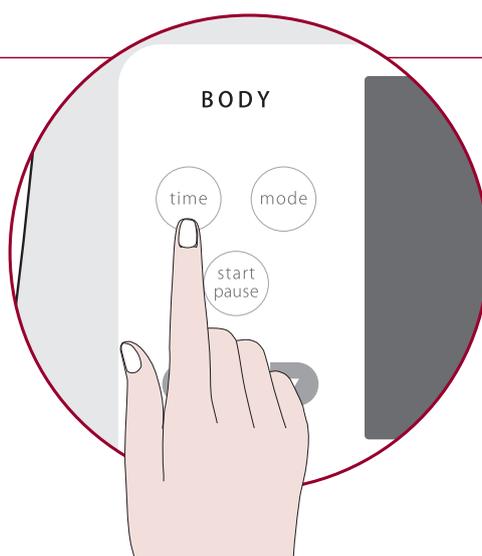

**【30分→25分→20分→15分→10分→5分】**




# 使用方法

## BODY-5モード (つづき)

### 7 スタート/ポーズスイッチを押してから、出力ボリュームを右に回して出力を開始・調節します。 [1 ~ 99]

- ・スタート/ポーズスイッチを押すとタイマーがスタートします。
- ・出力を一時停止する場合は、スタート/ポーズスイッチを押します。
- ・出力を再開する場合は、出力ボリュームを左に回し、出力レベルを“0”にしてから、スタート/ポーズスイッチを押して、出力ボリュームを右に回します。

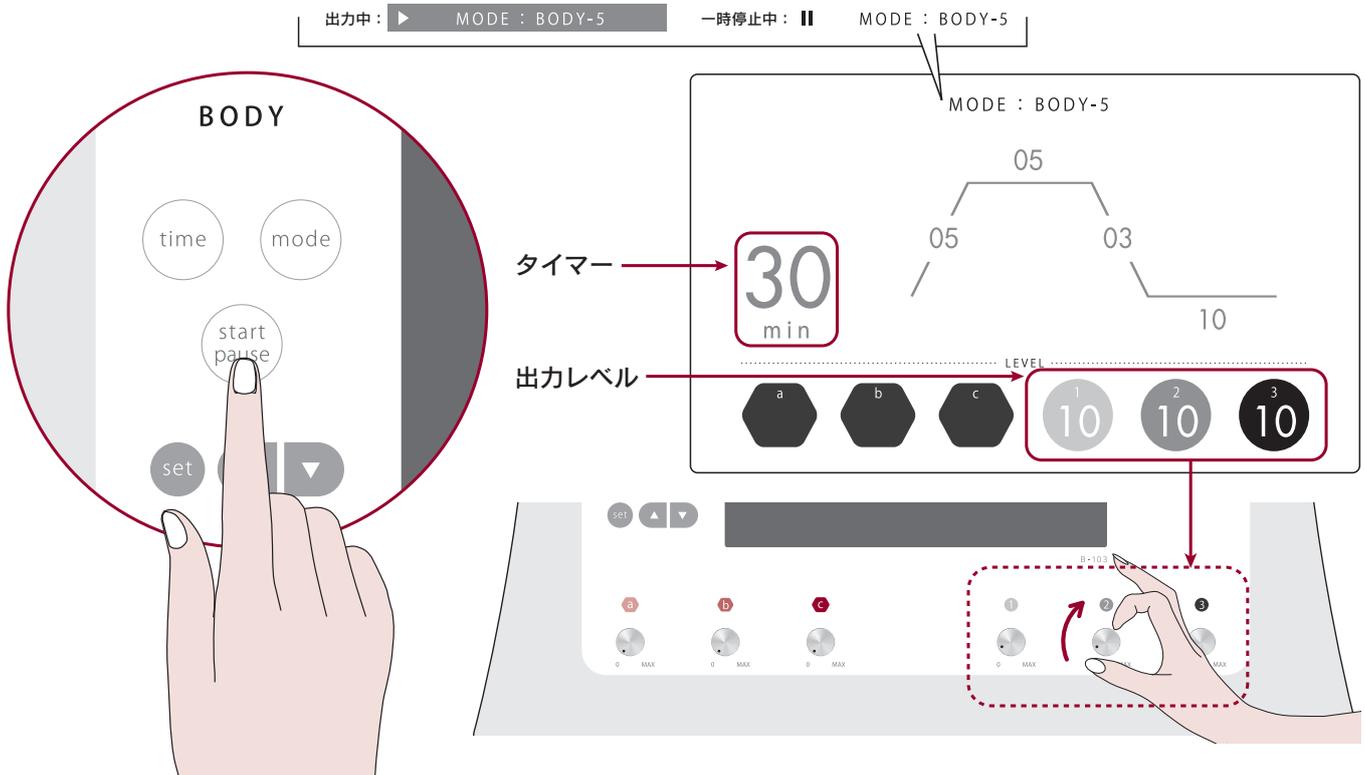

※トリートメント部位に強い刺激（鋭い痛みや熱感など）を感じた場合は、がまんせずに出力を下げてください。やけどなどの原因となります。

### 8 タイマーが終了すると終了音が鳴り、出力が停止します。

出力停止後、全ての出力ボリュームを“0”の位置に戻します。

#### ⚠ 注意

#### “0”スタート機能

出力開始時に強いレベルで出力されることを防ぐため、出力ボリュームが“0”の位置にないときは、出力を開始できません。

出力ボリュームを“0”の位置に戻し、スタート/ポーズスイッチを押してから出力ボリュームを回してください。

- 出力ボリュームが“0”の位置にないときに、モードスイッチやスタート/ポーズスイッチを押すと、出力レベル表示が点滅します。出力レベル表示が点滅しているときは出力できません。出力ボリュームを“0”の位置に戻してください。
- スタート/ポーズスイッチを押さずに出力ボリュームを回しても、出力レベル表示が点滅し、出力されません。スタート/ポーズスイッチを押してから、出力ボリュームを回してください。

---

## 故障かな?と思ったら

---

動作がおかしいと感じたときは、以下をご確認ください。

以下の対処を行っても問題が解消されない場合は、故障の可能性がありますので、購入先にご連絡ください。

### Q 電源が入らない

**A** 電源ケーブルが正しくAC100Vコンセントに接続されているか、また、電源スイッチがきちんとONになっているか確認してください。

---

### Q 出力レベル表示が点滅している

**A** 出力ボリュームが“0”の位置になっていません。出力ボリュームを“0”の位置に戻してください。

---

### Q 出力ボリュームを回しても出力されない

**A** スタート/ポーズスイッチを押さずに出力ボリュームを回しても出力できません。出力ボリュームを“0”の位置に戻し、スタート/ポーズスイッチを押してから出力ボリュームを回してください。





# 業務用EMS美容器 BODY THERA PRO II

## 保証書

本証は、お買い上げいただいた美容器が、厳密な検査基準に合格したものであることを証明します。また、通常の使用状態で生じた故障に対して、弊社が無償修理の責任を負うことを保証します。

- 故障修理の場合は、販売店へご連絡ください。
- 修理の際は、必ず本証をご提示ください（提示のない場合は有料となることがあります）。
- 本証は、日本国内においてのみ有効です。また本証は再発行しませんので、大切に保管してください。

### 保証内容

- 保証期間はご購入日より1年間です。
  - この保証は、通常の使用状態で生じた故障に限り、無償修理を行うものです。
  - 本器修理時の発送費用はお客様の実費負担となります。
  - 以下の場合は保証いたしかねます。
    - 本証に購入年月日及び販売店印の記載の無いもの
    - 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による故障
    - 取扱説明書に記載のない使用法の誤り、乱用による故障
    - 弊社以外で誤った修理または改造したために生じた故障
    - 付属消耗品
  - 転居などで、ご購入された販売店での修理が受けられない場合は、発売元へご連絡ください。
- ※保証期間後及び保証適用外の故障でも実費にて修理いたします。

製造番号		お買い上げ日	年 月 日
お名前			
ご住所	<b>見 本</b>		
電話番号			
販売店			
発売元	 <b>伊藤超短波株式会社</b> ビューティー営業部		
	〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8 TEL.048-254-1028 FAX.048-254-1029 <a href="https://www.beauty.itolator.co.jp/">https://www.beauty.itolator.co.jp/</a>		

販売店印の無いものは無効となります。